

本品は通常の救急絆創膏とは異なりますので、この添付文書をよく読みご使用ください。  
また、必要なときに読めるように大切に保管してください。



医療用品(4) 整形用品 管理医療機器 家庭用創傷パッド(JMDNコード 71025000)

## ハイドロウェット® α 防水タイプ

販売名「メディケアハイドロウェットR」

### ※ ハイドロウェット® α 防水タイプ の特長

独自素材「自着性ポリウレタンフォーム」を使用した高機能絆創膏です。オムツや生理用品にも使われている吸収力に優れたポリマーを配合しています。体液を吸収し、最適な湿潤環境を作り傷を早く治します。やわらかく、しなやかな素材で、凹凸部位にぴったりフィットします。パッドとフィルムテープを組合せることでより防水性を高めており、水仕事や入浴シーンの際にもお使いいただけます。

再使用禁止

### △ 使用上の注意

#### してはいけないこと

(定められた使い方を守ってください。守らないと症状が悪化したり、治癒が遅れたりする場合があります。)

- 次の部位には使用せず、医師の診断を受けてください。
  - (1) 感染した傷。(赤み、熱、腫れ、ズキズキした痛みが続いたり、膿をもつなどの異常がある。)
  - (2) 感染を起こす可能性のある傷。(深い傷。受傷後に時間が経った、滲出液がほとんど出ないような乾いた傷やかさぶたができた傷。ガラス・木片・砂・ほこり・衣服の繊維など、異物が入り込んだ傷。)
  - (3) 深いさし傷、筋肉、骨、腱が見えるような深い傷。
  - (4) 動物や人にかまれたり、ひっかかれた傷。
  - (5) にきび、湿疹、虫さされ、皮膚炎などの症状。
  - (6) 目の周辺、粘膜。
- パッドサイズより大きな傷には使用しないでください。傷の大きさより大きいサイズの製品をご使用ください。
- 1枚ずつ滅菌していますので、使用するまで包装は開封しないようにし、開封後はすみやかにご使用ください。また、一度使用したものを再使用しないでください。
- 傷口付近に水分、殺菌・消毒剤などの薬剤やクリーム、汚れなどが残っていると粘着性が損なわれますので、水道水などで洗い流してからご使用ください。
- パッドなどから水や滲出液などが漏れたり、はがれたりした時には、本品をはがして傷と傷周辺を水道水などでよく洗い流してから新しいものに貼りかえてください。使い始めはパッドの状況をこまめに観察し、1～2日を目安に貼りかえるようにしてください。
- パッドが傷口に固着してはがれない場合は、傷口を水道水で濡らすなどして柔らかくしてからゆっくりとはがしてください。
- 伸縮性に優れているため、引っ張ったまま貼付すると、戻す力により疼痛を引き起こすことがあります。貼付時は、パッド中央から端に向かって軽く押さえ、引っ張らないように貼付してください。また滲出液が少ない傷に使用すると疼痛を引き起こす場合がありますので、水道水などで事前に傷口を十分に湿らせて使用してください。
- 3歳未満の乳幼児には使用しないでください。

#### 相談すること

- 次の場合は使用前に、医師又は薬剤師に相談してください。  
医師の治療を受けている方、絆創膏などにかぶれやすい方が使用する場合。
- 次の場合は使用を中止し、医師の診断を受けてください。
  - (1) 本品の使用により、傷の悪化、化膿、感染(傷口の周りが赤い、熱をもつ、腫れやズキズキした痛みがある、膿をもっているなどの異常が認められる)などの症状があらわれた場合。
  - (2) 本品の使用により、発疹、発赤、かゆみなどの症状があらわれた場合。
  - (3) 数日間使用しても症状がよくなる場合。

### 形状・構造及び原理等

- ①形状及び構造／本品は吸水性のある自着性ポリウレタンフォームを使用した吸収パッドで、アクリル系粘着剤を使用した粘着テープ付きである。パッド下面のはくり紙をはがして創部に装着する。なお本品は滅菌包装されている。
- ②原理／本品は、高い吸収力と皮膚への粘着性を有する創傷被覆・保護材であり、真皮までの創傷における創傷治癒を促進するための湿潤環境を整える。本品は、滲出液の漏出を防止するだけでなく、感染や汚染を防止する機能も持ち合わせている。

### 使用目的又は効果

切り傷、すり傷、かき傷、あかぎれ、さかむけ、靴ずれなどの創傷及び軽度の熱傷(やけど)の「治癒の促進」、「痛みの軽減」、「湿潤環境の維持」、「保護」

本品は通常の救急絆創膏とは異なりますので、使用方法を確認して正しくご使用ください。

## 使用方法


### 貼付前



- ①「使用上の注意」をご確認ください。
- ②本品を貼しようとする傷が、感染(赤くなっていたり、膿を持っていたり、熱や腫れなどの異常が認められる)していないことを確認してください。また翌日以降など時間が経過し、傷から出る体液(滲出液)や血液が固まっていないことを確認してください。これらの症状がある場合はご使用をおやめください。
- ③殺菌・消毒剤や軟膏などは本品と併用しないでください。使用した場合は、水道水などでよく洗い流し、傷口に付着した汚れや異物を取り除いてからご使用ください。

- ④傷を水道水などでよく洗浄し、傷の周囲の空気を清潔な布やティッシュペーパーなどでふきとってください。
- ⑤傷のサイズより大きいサイズの製品を選んでください。また、一度個包装を開封したものを使用したり、一度使用したものを再使用しないでください。

### 貼り方

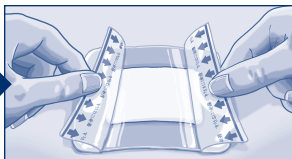

- ①清潔な手で袋から本品を取り出し、はくり紙の片側をはがします。
- ②反対側のはくり紙の端を持ち、粘着面が浮いたり、しわにならないように傷口にあてながら、反対側のはくり紙もはがしてパッド全面を貼付します。表面のシート(緑色の矢印が付いたシート)は、一番最後にはがします。そのままの状態では粘着面を傷口に貼付してください。
- ③粘着面を貼付したら、表面のシート(緑色の矢印が付いたシート)を中央から矢印の方向へゆっくりとはがし、全体を軽く押さえて密着させます。


※一度はがしてしまうと貼り付きにくくなるのでご注意ください。※伸縮性に優れているため、引っ張ったまま貼付すると、パッドの戻る力により疼痛を引き起こすことがあります。貼付時はパッド中央から端に向かって軽く押さえ、引っ張らないように貼付してください。※関節部やあごなどの凹凸のある部分はしわになりやすいので、ていねいに貼付してください。

### 貼付中



- ①貼付後しばらくすると、傷口からにじみ出てくる滲出液を本品が吸収・保持します。傷が治るにしたがい、滲出液の分泌が減っていきます。
- ②貼付中、傷口からにじみ出てくる滲出液が貼付した本品の端から漏れた場合や、本品が汚れたり、はがれそうした場合、または、はがれてしまった場合は、「貼りかえ時の注意」にしたがって本品をはがし、傷と周りの皮膚を水道水などで洗浄した上で新しいものと貼りかえ、傷口を清潔に保ってください。
- ③貼付中は、本品をはがさずに1日に1回は傷を観察し、感染を示す症状(傷口の周りが赤くなっていたり、ズキズキした痛みが続いたり、膿を持っていたり、熱や腫れなどの異常)が認められないことを確認してください。特に使い始めはこまめに観察し、1～2日を目安に貼りかえるようにしてください。感染の症状が認められた場合は、直ちに使用を中止して、医師に相談ください。

### 貼りかえ時の注意

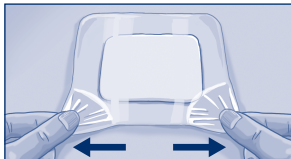

- ※本品の両端を両手でつまんでゆっくりと左右に引っ張ってパッドを浮かし、やさしくはがしてください。
- はがれにくい場合は温水を皮膚と本品の隙間に流し込むようにすると、はがれやすくなります。
- 出血・脱毛させたり、再生した皮膚を取り除かないように、注意して静かにはがしてください。

## 保管及び取扱い上の注意

- お子様の手の届かないところに保管してください。●高温多湿をさけ、直射日光が当たらない場所に保管してください。
- 保管状態によってはパッドが透明になる場合がありますが、品質上問題ありません。●袋の裏面右上に使用期限を記載しています。●使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

## 規格

| 製品   | 寸法                             | 入数  |
|------|--------------------------------|-----|
| Sサイズ | 50mm×80mm<br>(パッド部25mm×40mm)   | 3枚入 |
| Mサイズ | 80mm×100mm<br>(パッド部40mm×65mm)  | 3枚入 |
| Lサイズ | 100mm×115mm<br>(パッド部65mm×70mm) | 3枚入 |

発売元 森下仁丹株式会社

大阪市中央区玉造1丁目2番40号  
<https://www.medicare.jp>  
 お問合せ先 ☎0120-181-109  
 平日9:00～21:00(土・日・祝日9:00～17:00)

※製造 スミス・アンド・ニューフェーズ株式会社

販売元 新タック化成株式会社

滅菌済

MHWB-3KL